

Microcone® Frez Durdurucu Tepsisi / Microcone® Frez Durdurucu

		MICROCONE®											
Microcone® İmplant D 5,0 mm		56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
	—	15	13	11		9	8	6,5					short Drill D4,5/4,8
	≡				15		13		11	9	8	6,5	
Microcone® İmplant D 4,5 mm		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
	—	15	13	11		9	8	6,5					short Drill D4,0/4,3
	≡				15		13		11	9	8	6,5	
Microcone® İmplant D 4,0 mm		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	—	15	13	11		9	8	6,5					short Drill D3,5/3,8
	≡				15		13		11	9	8	6,5	
Microcone® İmplant D 3,5 mm		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	—	15	13	11		9	8	6,5					short Drill D3,0/3,3
	≡				15		13		11	9	8	6,5	
Microcone® İmplant D 3,0 mm		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	—	15	13	11									short Drill D2,5/2,8
	≡				15		13		11				
Pilot frez D 2,0 mm		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	—	15	13	11		9	8	6,5					short Drill D2,0
	≡				15		13		11	9	8	6,5	



← Kısa frez —

← Uzun frez ≡



Örnek: Microcone® İmplant D 3,5 x 11 mm:

Kısa frez — -> Frez durdurucu no.25

Uzun frez ≡ -> Frez durdurucu no.30

Microcone® Frez Durdurucu Tepsisi / Microcone® Frez Durdurucu

Dezenfeksiyon, temizleme ve sterilizasyon konusundaki aşağıdaki talimatların DIN EN ISO 17664:2004 gerekliliklerinin özeti olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz. Talep etmeniz halinde detaylı açıklamayı göndermekten memnuniyet duyarız.



1. Sistem açıklaması

Microcone implant sistemi implantlar, kapama vidaları, transgingival dayanakları ile diğer protez parçalarını ve ayrıca cerrahi ve protez aletlerini ve aksesuarlarını kapsamaktadır. Microcone komponentleri bir bütün sistemin bir bölümünü oluşturur ve sadece orijinal material ve aletler ile birleştirilerek kullanılabilir.

2. Ürün açıklaması

Medentika Microcone Frez Durdurucu Tepsisi Mikrocone Frez Durdurucular için saklanması için kullanılır. Plastik kaset tabanı ve paslanmaz çelik koruma kapağından

3. Sipariş bilgileri ve ölçüler

Ürün Kodu	Genişlik	Derinlik	Yükseklik
0-13-62	170mm	145mm	31mm

4. Materyaller

Kaset: Polypropylene (PP)
Koruma kapağı: paslanmaz çelik (1.4404)

5. Doğru Kullanım:

Medentika Frez Durdurucu Tepsisi cerrahi ve protez prosedürler sırasında sadece Microcone Frez Durdurucuların organizasyonu ve hazırlığı için kullanımı amaçlanmıştır. Microcone Frez Durdurucular sadece Medentika Microcone implant dilleri ile birlikte kullanılmalıdır. Her Frez Durdurucu ilgili implant çapına karşılık gelen standart ve kortikal frez ile birlikte kullanılabilir. Pilot frez için ayrı frez durdurucu mevcuttur. Sterilizasyon için, Frez Durdurucu Tepsisi uygun materyal içerisinde paketlenmeli veya sarımalı ve steriliteyi sürdürmek için saklanmalı. Diğer seçenekler kullanıcı tarafından değerlendirilmeli ve doğrulanmalıdır.

Aşağıda tavsiye edilen şekilde her kullanım öncesinde tepsi ile içeriği kullanım için temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir. Bu işlem ilk kullanım içinde yapılmalıdır.

Kullanılmış ve cerrahi işlem sırasında bulaşmış olan durdurucular tepsi içerisine yerleştirilmeden önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir, eğer uygunsuz parçalara ayrılmıştır. (bölüm 6 ve aletler kullanım kılavuzuna bakınız). Bu talimatlara ilave olarak, ülkenizin yasal gereksinimlerine uyunuz.

Microcone Frez Durdurucu Tepsisi, her sırada belli bir implant çapına özgü freze karşılık gelen durdurucuların diziliminden oluşmuştur. Karşılık gelen frezlerin çapları her durdurucu sırasının altında kazanmıştır. Her durdurucu ayrıca renkli halka ile kodlanmıştır ve kendisine karşılık gelen frez ve implant paketi üzerinde renk kodlaması bulunmaktadır. Renk kodlaması ayrıca her durdurucu sırasının yanında bulunmaktadır.

Buna ilaveten, her frez durdurucunun altında ayrıca kısa veya uzun frez kullanıldığında karşılık gelen durdurucu ile ulaştığı delme derinliği hakkında bilgi bulunur. Her frez durdurucunun kendine ait numarası vardır ve tepsi içerisinde belirlenmiş yeri vardır. Eğer durdurucula dikkatlice yerleştirilirse, tüm durdurucuların baş kısımları hizalanır.

6. Temizlik ve dezenfeksiyon

Optimal sterilizasyon şartlarını garantilemek için aletlerin ve tepsinin dikkatli temizliği ve dezenfeksiyonu ön koşuldur. Cerrahi kalıntılar (kan, doku parçaları, sekresyonlar) aletler üzerinde kurmamalıdır. Kullanımdan sonra aletler üzerindeki yoğun kirlenme direkt olarak su veya dezenfektan ile gerekirse yumuşak sünger veya bez kullanılarak uzun süreli nem veya ıslaklığa maruz kalmasını engelleyerek uzaklaştırılmalıdır. Aletler, uygun temizleme ve dezenfektan solüsyonu kullanılarak el ile veya termo-dezenfektör (üreticinin kullanım kılavuzuna uyulmalıdır) yardımıyla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir. Plastik tepsi " yıkama tepsisi" olarak kullanılmamalı ve termo-dezenfektör için uygun değildir. Lütfen unutmayın, titanyum ve paslanmaz çelik aletler temasa bağlı korozyon riski nedeniyle ayrı ayrı temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Nötr pH değerine yakın enzimatik temizleme ajanları kullanımı önerilir. Halojenleri (klorin, iodyene, bromin, flüorin), okside edici maddeler (H2O2), organik çözücüler, ağır metal tuzları, aldehitler veya aromatik/holojenlenmiş hidrokarbonları içeren temizleme maddelerini veya dezenfektanları kullanmayınız. Metal fırçalar veya ovalayıcılar gibi aşındırıcılar ile kesinlikle temizlemeyiniz. Aşağıdaki adımlar termo-dezenfektör içerisinde otomatik temizleme/dezenfeksiyon işlemi için önerilmektedir.

6.1 Temizleme:

- Soğuk su ile 1 dakika durulayın
- Uygun bir temizlik maddesi (neodisher® MediClean (0.5%)) ile 55°C (± 2°C) 5 dakika temizleyin
- 2 dakika soğuk su ile nötralizasyon
- Soğuk su ile 1 dakika durulayın

6.2 Dezenfeksiyon:

93°C de 5 dakika demineralize su ile termal dezenfeksiyon yapılır.

Aşağıdaki adımlar el ile temizlik/dezenfeksiyon işlemi için önerilir:

6.3 Temizleme (El ile):

Özellikle kaviteleri, yarıkları ve delikleri yumuşak fırça kullanarak akan suyun (içme suyu, 30 ± 3°C) altında mevcut artıklar giderilinceye kadar (her parça için en az 20 saniye) tüm yüzeyi mekanik olarak temizleyin. Ultrasonik banyoda (minimum frekans: 35 kHz) 5 dakika uygun bir temizleme solüsyonu (örn. İçme suyu içerisinde 2% MediClean®, Dr. Weigert.) ile temizleyin. Özellikle kaviteleri, yarıkları ve delikleri akan suyun (içme suyu, 30 ± 3°C) altında her parça için en az 10 saniye olacak şekilde durulayın. Bu işlem sırasında hareketli parçalar yerlerinden oynatılmamalıdır. Her parça için en az 5 saniye olacak şekilde demineralize su ile durulanır.

6.4 Dezenfeksiyon (El ile)

Parçaları 30 dakika dezenfektana (Örn., 2% neodisher® SeptoMED, Dr. Weigert, içme suyu 20 ± 2°C) batırın ve yüzeydeki hava baloncuklarını gidermek parçaları solüsyon içerisinde hareket ettirin. Özellikle kaviteleri, yarıkları ve delikleri akan suyun (içme suyu, 30 ± 3°C) altında dezenfektan kalıntıları gidermek için tüm yüzeyleri durulayın. Bu işlem sırasında

hareketli parçalar yerlerinden oynatılmamalıdır. Her parça için en az 5 saniye olacak şekilde demineralize su ile durulanır.

Kullanılmamış ve kontamine olmamış aletler dezenfeksiyon ve temizleme işlemi sırasında kaset içerisinde bırakılabilir. Bu sırada kullanılmış ve kontamine olmuş aletler değiştirilmeden önce teker teker temizlenmelidir. Sterilizasyon öncesi, aletler kirsizlik ve hasar yönünden incelenmelidir. Kontamine olmuş veya hasar görmüş aletleri kullanmayınız. Silikon deliklerin ve alet tutucuların sağlam ve doğru pozisyonlarında yerleşmiş olduklarından emin olun. Kilitlerin ve sapların sağlam ve mükemmel durumda olduğunu kontrol edin.

7. Sterilizasyon

Aletleri steril olarak korumak için sterilizasyon banyosu konusunda üreticinin talimatlarına göre kasetin paketlenmesi önerilir. Kaset ile içindelerinin sterilizasyonu sadece vakum sterilizatör/vakum otoklav için test edildi ve doğrulandı. - 3x ayrıştırılmış ön-vakum ile 132°C'de (270°F) 4 dakika sterilizasyon işlemi uygulanır. - Kaset ile birlikte aletlerin 20 dakika kurumasını sağlayın

Lütfen vakum sterilizatör veya vakum otoklav için üreticilerin talimatlarını takip ediniz. Diğer sterilizasyon yöntemleri veya protokolleri kullanıcı tarafından kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır. Kasetlerin istiflenmesi ve otoklava aşırı yüklenme, sterilizasyon ve kurutma işleminin etkinliği üzerinde zararlı etkiye sahiptir. Kasetleri otoklavın haznesinde istiflemeyiniz.

Not:

1. Kaseti kapak yüzü yukarı bakacak şekilde ızgara üzerine yerleştiriniz. Bu tam olarak kurumayı sağlayacaktır. Bu pozisyonda su iyi bir şekilde yapısı gereği kaset üzerinden akacaktır.
2. Otoklavın kapağı açıldıktan sonra kaset yeterli zaman verilerek ısıyı düşürülmelidir. Kaseti tamamen soğuyana kadar yeterli hava dolaşımının bulunduğu uygun bir yere koyunuz. Eğer kaset tamamen soğumaz ise su yoğunlaşması oluşabilir.

İşaretler ve Semboller:

- ⊗ Tek kullanımlık
- LOT LOT numarası
- REF Referans numarası
- 🏭 Üretici
- 📖 Kullanım talimatına bakınız
- ⚠️ Steril değildir
- ⚠️ Dikkat: Bu ürün A.B.D. Federal yasaları gereği dış hekimlerine satılabilir.

Medentika® GmbH
Hammweg 8–10
DE-76549 Hügelsheim/Germany
Tel: +49-7229-69912-0
Fax: +49-7229-69912-20
E-Mail: info@medentika.de
www.medentika.de